

VirKon

DESINFEKSJONSMIDDEL - BLANDING OG BRUK - 5 GRAM TABLETTER

1.

Fyll flasken med 1 liter lunkent vann



Blandingsforhold:
1 tablett
pr 0,5 liter lunkent vann.

2.

Bruk 2 tabletter, slipp de ned i flasken.
(5 gram tabletter, 2 tabletter pr liter)



3.

Vent 5 minutter til tablettene er løst opp og vend flasken forsiktig 2-3 ganger



Etter ca 5 minutter er bruksløsningen klar, og ferdig til bruk. Ved større volumer tilsettes en 2 tabletter eller en måleskje per liter vann. Lunkent vann løser tablettene raskere. Det skal alltid benyttes beskyttelseshansker ved håndtering av desinfeksjonsmidler. Annet beskyttelsesutstyr kan anvendes etter lokale pålegg.

Bruksløsning

Bruksløsningen har en lys rosa farge med pH 2,6. Ubrukt bruksløsning er holdbar i en uke. Brukt bruksløsning skiftes daglig og hyppigere hvis synlig forurenset.

Effekt

VirKon har god effekt overfor:

- Bakterier med unntak av mykobakterier/TBC
- Virus (alle kjente virusfamilier, kappekledd og ikke kappekledd)
- Sopp

Materialpåvirkning

VirKon er godt forlikelig med de aller fleste materialer som plast, gummi, epoxy, glass og rustfritt stål. Unntatt fra dette er aluminium, messing og legeringer, eksempelvis forekommende i endoskop eller andre typer delikate instrumenter. Mindre mengder (<10 liter) brukt VirKon-løsning kan helles direkte i avløp. Skyll etter med rikelige mengder vann.

Desinfeksjon av ikke synlig forurenset utstyr og flater:

Utstyr

Legg utstyret i bruksløsning. La det ligge i 10 minutter. Lengre eksponeringstid øker ikke effekten, men kan skade materialet. Skyll deretter godt med rent vann.

Overflater

Flaten bearbeides med svamp eller lignende, godt fuktet med VirKon løsning. Virketid 10 minutter. Tørk etter med en fuktet klut, papir eller lignende.

Desinfeksjon av synlig forurensete utstyr og flater:

Utstyr

Legg utstyret i VirKon bruksløsning i 30 minutter. Skyll deretter godt i rent vann.

Overflater

Fjern forurensningen på foreskrevet måte, gjerne med celledoff fuktet med VirKon løsning. Deretter foretas normal desinfeksjon som for rene flater.

Avskylles i rent vann eller tørkes med fuktet klut, papir eller lignende.

VirKon er godkjent av Statens Legemiddelverk.

Du kan lese mer om VirKon på www.vadexit.se



BrageMedical

www.bragemedical.no

Boks 341, Bragernes, Nedre Storgt. 15-17
3001 Drammen
info@bragemedical.no
T: 32 83 59 00, F: 32 83 59 01